

隔离衣说明书

【产品名称】 隔离衣

【产品型号、规格】 (单位: cm)

型号/规格	身长	肩宽	胸围	袖长	袖口
倒背式/S	110	55	61	62	6
倒背式/M	115	57.5	63.5	64	6
倒背式/L	127	60	66	66	6.5
倒背式/XL	135	60	66	68	6.5
倒背式/XXL	140	62	70	68	7
倒背式/XXXL	145	62	70	70	7
偏差	±2	±2	±2	±2	±2

【产品性能、结构及组成】 所有产品型号均为倒背式;袖口处有松紧,背为全开口由布带扎紧。非无菌提供,一次性使用。

【产品适用范围】 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。

【禁忌症】 1、患处皮肤破损溃烂者及孕妇禁止使用。2、仅供外用,严禁口服。

【注意事项】 【注意事项】

1. 穿隔离衣的整个过程中,保持衣领清洁,系、解衣领时污染的袖口不可触及衣领。
2. 如果脱下的隔离衣挂在半污染区或橱内,要清洁面朝外;如挂在污染区,污染面朝外。
3. 穿隔离衣进入污染区后,不得再进入清洁区。
4. 隔离衣必须每天更换,如有破损、潮湿或污染,应立即更换。

【警示及提示的内容】

产品一次性使用,使用完后丢弃至医用垃圾桶内。

【维护和保养】 长时间不使用应密闭保存。

【贮存】 包装后的产品应避免堆压存放,环境温度不超过 45℃,相对湿度不超过 65%,周围无有害及腐蚀性物体,通风良好的库房中。

【运输条件、方法】 运输过程中应注意防止挤压、尖物扎载、潮湿和油物污染。

【产品技术要求编号】

生产日期: 见产品标签。

【医疗器械产品备案凭证编号】

失效日期: 见产品标签

【医疗器械生产备案凭证编号】

【备案人】 海盐博纳电子科技有限公司

【备案人住所】浙江省海盐县西塘桥街道海鸥路 505 号

【备案人联系方式】13758381088

【生产企业】海盐博纳电子科技有限公司

【生产企业住所】浙江省海盐县西塘桥街道海鸥路 505 号

说明书编制日期：2020 年 5 月 3 日

最小销售单元标签

【预期用途】详见说明书
【使用方法】详见说明书
【注意事项】详见说明书

产品备案凭证编号：

生产备案凭证编号：

隔离衣

海盐博纳电子科技有限公司

【贮藏】温度 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 65\%$ 【产品批号】
干燥通风处遮光保存 【生产日期】
【型号】 【规格】 【失效日期】
“其他内容详见说明书”

【生产企业生产地址】浙江省海盐县西塘桥街道海鸥路 505 号

【生产企业联系方式】0573-86865801

【售后服务单位】海盐博纳电子科技有限公司