

吸唾管产品说明书

2022年03月07日编制（第二版）

产品技术要求编号：冀沧械备 20160007 号

医疗器械备案凭证编号：冀沧械备 20160007 号

生产备案凭证编号：冀沧食药监械生产备 20150005 号

一、产品名称

产品名称：吸唾管

型号/规格：根管吸管（I型、II型、III型）

二、生产企业信息

备案人/生产企业/售后服务：黄骅市康田医疗器械有限公司

企业住所：黄骅市开发区模具城

生产地址：河北省沧州市黄骅市开发区模具城

销售电话：0317-8881703

售后服务：黄骅市康田医疗器械有限公司

售后服务电话：16630731877

网 址：<http://www.ktzyl.com>

三、产品结构、性能、适用范围

本产品由长吸管、转接头、吸引头三部分组成。柔韧细小的吸引头能深入根管、窝洞等狭小空间，利用负压吸除窝洞、根管及根管分支、侧支内的液体。适用于根管冲洗、根管干燥、树脂粘接、印模、牙周治疗等需要精准抽吸的情况。

四、产品使用说明

1. 使用前对本产品进行 134℃ 高温高压消毒处理。
2. 根据不同的临床需求，将长吸管与牙椅弱吸接口直接连接，或通过转换头与强吸接口连接。
3. 启动抽吸装置开关，将吸引头置于所需部位，吸取根管冲洗液及其它液体。

五、生产日期

生产批号：见包装 生产日期：见包装 失效日期：见包装

六、产品使用注意事项

1. 产品禁忌症：对塑料过敏者慎用。
2. 包装破损或产品损伤时禁止使用。
3. 本品为一次性耗材，不可重复使用。
4. 需要有医疗资质的医生使用。
5. 请不要在原本的使用目的以外使用本品。
6. 为保证使用效果，安装时请确认长吸管和吸力装置紧密连接。

七、产品储存、保养方法

1. 本产品一次性使用，用后废弃处理。
2. 本产品应存放在干燥、通风、常温、相对湿度不大于 80%、无腐蚀性气体的室内。
3. 避免阳光直射。
4. 运输、储存中防止外界的挤压，防止变形。



吸唾管说明书

2022年03月08日编制（第三版）

产品技术要求编号：冀沧械备 20160008 号

医疗器械备案凭证号：冀沧械备 20160008 号

医疗器械生产备案凭证号：冀沧食药监械生产备 20150005 号

一、产品名称

产品名称：吸唾管

型号/规格：弱吸、强吸（有孔、无孔）、手术弯管（1/4、1/8、1/16）、法式长弯管（I型、II型）、点吸管（I型、II型、III型）

二、生产企业信息

备案人/生产企业/售后服务：黄骅市康田医疗器械有限公司

企业住所：黄骅市开发区模具城

生产地址：河北省沧州市黄骅市开发区模具城

销售电话：0317-8881703

售后服务：黄骅市康田医疗器械有限公司

售后服务电话：16630731877

网 址：<http://www.ktzyl.com>

三、产品结构、性能、使用范围

牙椅配套耗材吸唾管是现在口腔治疗中必不可少的配件，此产品为管、帽组合结构或独立塑管结构。配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。

四、产品使用方法

1. 使用前确认本品洁净。
2. 将本品与综合治疗台的抽吸装置连接，确认连接牢固后，方可进行抽吸操作。

五、生产日期

生产批号：见包装

生产日期：见包装

失效日期：见包装

六、产品使用注意事项

1. 产品禁忌症：对塑料过敏者慎用。
2. 产品出现损伤、变形时禁止使用，包装出现破损时禁止使用。
3. 本品为一次性使用，不可重复使用。
4. 需要有医疗资质的医生使用。
5. 请不要在原本的使用目的以外使用本品。
6. 在使用时需避免将整个吸唾头全部埋入口腔软组织内，以防吸唾头被完全阻塞，从而产生过大的负压，对软组织造成损伤。

七、产品储存、保养方法


1. 本产品一次性使用，用后废弃处理。
2. 本产品应存放在干燥、通风、常温、相对湿度不大于 80%、无腐蚀性气体的室内。
3. 避免阳光直射。
4. 运输、储存中防止外界的挤压，防止变形。



OPEN

吸唾管


ST07

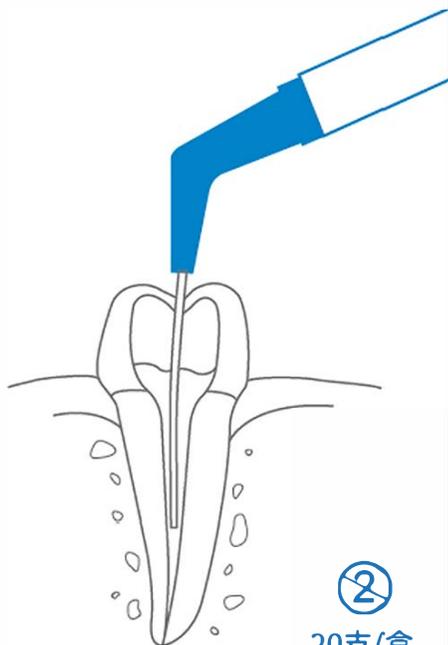

20支/盒


型号/规格:

根管吸管I型
 根管吸管II型
 根管吸管III型

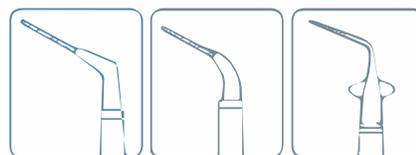

本产品由长吸管、转接头、吸引头三部分组成。柔韧细小的吸引头能深入根管、窝洞等狭小空间，利用负压吸除窝洞、根管及根管分支、侧支内的液体。适用于根管冲洗、根管干燥、树脂粘接、印模、牙周治疗等需要精准抽吸的情况。

产品为一次性使用，使用前可进行134℃高温高压消毒处理。

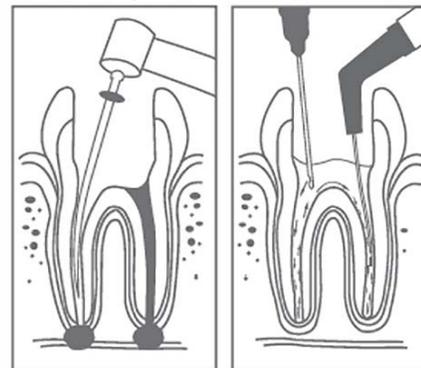

其他内容详见说明书



康田官方公众号

【备案人/生产企业/售后服务】冀州市康田医疗器械有限公司
 【住所】冀州市开发区模具城
 【生产地址】河北省沧州市冀州市开发区模具城
 【电话】0317-8881703 【售后服务】16630731877
 【网址】http://www.ktzyi.com
 医疗器械备案凭证编号：冀沧械备20160008号
 产品技术要求编号：冀沧械备20160008号
 生产备案凭证编号：冀沧食药监械生产备20150005号

生产批号：
 生产日期：
 失效日期：





规格: I型
 II型
 III型


Health Nature
 Beautiful

http://www.ktzyl.com
 0317-8881703



吸 唾 管

型号: J0303

Health
 Nature
 Beautiful

【备案人/生产企业/售后服务】黄骅市康田医疗器械有限公司
 【住所】黄骅市开发区模具城
 【生产地址】河北省沧州市黄骅市开发区模具城
 【电话】0317-8881703
 【售后服务】16630731877
 【网址】http://www.ktzyl.com

医疗器械备案凭证编号:冀沧械备20160008号
 产品技术要求编号:冀沧械备20160008号
 生产备案凭证编号:冀沧食药监械生产备201500055号

CE ISO 1485
 其他内容见说明书
 生产批号:
 生产日期:
 失效日期:





型号/规格:

法式长弯管I型

法式长弯管II型

吸 唾 管

Health Nature
Beautiful

<http://www.ktzyl.com>

0317-8881703



康田官方公众号

Health
Nature
Beautiful

【备案人/生产企业/售后服务】黄骅市康田医疗器械有限公司

【住所】黄骅市开发区模具城

【生产地址】河北省沧州市黄骅市开发区模具城

【电话】0317-8881703

【售后服务】16630731877

【网址】<http://www.ktzyl.com>

医疗器械备案凭证编号:冀沧械备20160008号

产品技术要求编号:冀沧械备20160008号

生产备案凭证编号:冀沧食药监械生产备20150005号

CE-ISO 13485

其他内容详见说明书

